


## サービス内容ご利用タイミング

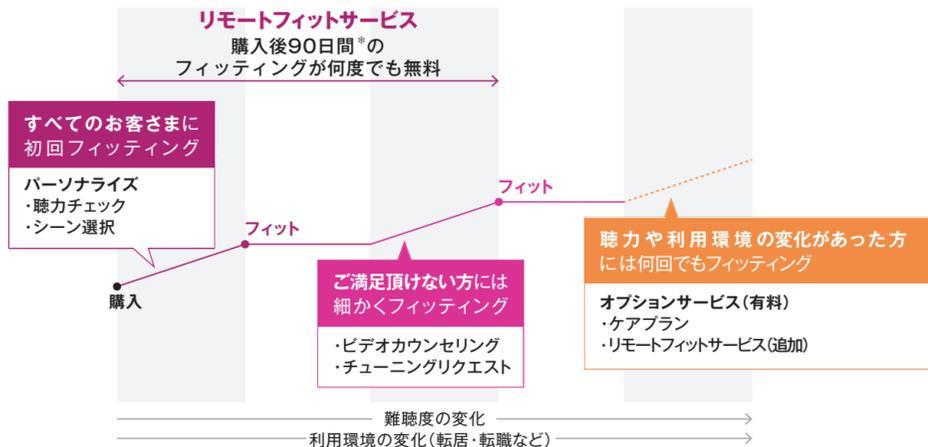

アシスタント(チャット)/ 聴こえのトレーニング / ご相談・お問い合わせはいつでもご利用頂けます。(無料)

\* 2022年7月28日以前に製品をご購入された方は60日間となります。

### パーソナライズ

アプリを操作して聴力チェックを行い、チェック結果に合わせてフィッターが設定データを作成するサービスです。

### ビデオカウンセリング

フィッターとのビデオコールを通じてカウンセリングや聴力チェックを行い、よりお客さまに合った設定データを作成するサービスです。

※ 予約制です。アプリからご予約ください。

### シーン選択

「オンライン会議」や「リビング」といった、使用環境(シーン)別の設定データを10シーンまで作成可能。本体には4つまで登録でき、シーンに応じた切り替えが可能です。

### チューニングリクエスト

設定データを細かく調整するサービスです。しばらくご使用いただいたあと、現状の設定データに対して調整してほしい内容をアプリでリクエストできます。

## ご購入にあたっての注意事項

次に該当する方はご使用できない場合があります。医師に相談してください。

- 耳の手術を受けたことがある
- 最近3か月以内に耳漏があった
- 最近2か月以内に聴力が低下した
- 最近1か月以内に急に耳鳴りが大きくなった
- 外耳道に痛み、またはかゆみがある
- 耳あかが多量にたまっている
- 聴力測定の結果、平均聴力の左右差が25dB以上ある
- 聴力測定の結果、500、1000、2000Hzの聴力に20dB以上の気骨導差がある

○本製品は軽度・中等度難聴の方向への聴力を補う機器です。高度・重度難聴の方の聴こえには適応できません。また、聴こえには個人差があります。軽度・中等度難聴の方であっても適応できない場合があります。○補聴機能の効果を発揮するため、使用開始前に適切な調整が必要です。しかしお客さまの聴こえの状態によっては、その効果が異なる場合があります。○難聴の度合いが心配な方は、耳鼻咽喉科の受診をおすすめします。○本製品を初めてご利用いただく際の設定とリモートフィットサービスにはスマートフォンが必要です。フィッティング後、日常の使用では本製品単独で使用することも可能です。

## スペック表

一般的名称	耳あな型補聴器
販売名	メディカルリスニングプラグ
形名	MH-L1-B/MH-L1-P
製造販売業者	株式会社ニューロシューティカルズ
医療機器認証番号	303AFBZX00058000
適応難聴度	軽度～中等度難聴
サイズ(長さ×幅×高さ)	25.0mm×13.6mm×24.1mm
質量/カラー	5.8g/個/ブラック、ナチュラルピンク
リスニングモード(補聴器機能)*1	
チャンネル数/シーンメモリ数	8ch/4
最大音響利得	最大値(ピーク値):48dB HFA-FOG:37dB
90dB入力最大出力音圧レベル	最大OSPL90:115dB SPL HFA-OSPL90:110dB SPL
ハウリング抑止/ノイズリダクション/衝撃音抑止	○/○/○
ストリーミングモード(オーディオ機能)	完全ワイヤレス方式(TWS)
ハンズフリー通話	電話の着信と通話に対応
対応スマートフォンOS	Android™ 8.0以上 または iOS 13以上
Bluetooth®対応バージョン/プロファイル*2	Bluetooth® 5.0/HFP,A2DP,AVRCP
電池	
種類/容量	リチウムイオン充電電池/3.7V 70mAh
使用時間*3	リスニングモード時:約20時間(充電ケース併用時:約55時間) ストリーミングモード時:約6時間(充電ケース併用時:約16時間) 約2時間40分
充電完了時間	約2時間40分
防水等級/防塵等級	Class 4 (IPX4*4)/Class6 (IP6X*5)
充電ケース	
サイズ(幅×奥行×高さ)	66mm×26mm×38mm
質量/カラー	42g/シルバー、ナチュラルピンク
充電端子/入力電圧	USB Type-C®/5V, USB Type-A/5V
電池	
種類/容量	リチウムイオン充電電池/3.7V 380mAh
充電完了時間	約2時間40分(SH-AC04使用時)

- \*1 数値はJIS C 5512:2015により測定(2cm<sup>3</sup>カプラーを使用)。
- \*2 すべてのBluetooth機器とのワイヤレス通信を保証するものではありません。Bluetoothプロファイルとは、Bluetooth製品の特性ごとに機能を標準化したものです。
- \*3 使用環境により変化します。
- \*4 IPX4とは、30～50cmの距離から10リットル/分の水を5分間以上上注水してもメディカルリスニングプラグ本体に有害な影響がないことを意味します。
- \*5 IP6Xとは、保護度合いを指し、直径75μm以下の塵埃(じんあい)が入った装置にメディカルリスニングプラグ本体を8時間入れてかかはんさせ、取り出したときに補聴器の内部に塵埃が侵入しない機能を有することを意味します。

○「メディカルリスニングプラグ/Medical Listening Plug」[ココロストア/COCORO STORE][ココロリスニング/COCORO LISTENING]は、シャープ株式会社の登録商標または商標です。○iOSは、Apple Inc.のOS名称です。IOSは、Cisco Systems, Inc.またはその関連会社の米国およびその他の国における登録商標または商標であり、ライセンスに基づき使用されています。○Androidは、Google LLCの商標です。○Bluetooth®のワードマークは、Bluetooth SIG, Inc.が所有する登録商標であり、シャープ株式会社は、これらのマークをライセンスにもとづいて使用しています。○USB Type-C®はUSB Implementers Forumの登録商標です。○QRコードは株式会社デンソーウェーブの登録商標です。○KnowlesはKnowles Electronics, LLCの商標です。○そのほかの記載している会社名、製品名は各社の登録商標または商標です。

お問い合わせはこちら！

### COCORO LISTENINGサービスセンター

問い合わせフォームからお問い合わせください  
<https://cocorostore.jp.sharp/form/mlp-inquiry/>  
受付時間 平日および土曜日 10:00～17:00(日曜日、祝日および年末年始を除く)



製造販売業者 株式会社ニューロシューティカルズ  
本社 〒113-0033 東京都文京区本郷1-28-10

シャープ株式会社  
本社 〒590-8522 大阪府堺市堺区匠町1番地

このカタログの内容は2022年8月現在のものです。

MHL1BK2

## メディカルリスニングプラグ 耳あな型補聴器

軽度～中等度難聴向け  
カタログ 2022-8

MH-L1-B/MH-L1-P  
希望小売価格 99,800円(非課税)

## あなたの“聴く”に寄り添うシャープの補聴器



MH-L1-B  
ブラック

MH-L1-P  
ナチュラルピンク

まずは  
ここを  
チェック！



### メディカルリスニングプラグ 公式サイト

<https://jp.sharp/mlp/>

補聴器選びのお役立ち情報満載！



## ケアプラン

5年 延長保証\*

5年 盗難・紛失補償

1年 リモートフィットサービス  
(追加)

MH-LS01  
希望小売価格 33,000円(税込)

\* 自己負担金が必要です。オプションサービスの詳細は、  
メディカルリスニングプラグ公式サイトをご覧ください。

## リモートフィットサービス (追加)

60日



MH-LS02  
希望小売価格 11,000円(税込)

※ イラストはイメージです。



“聴く力”を支える道具を、  
時計やメガネのようにあたりまえに

メディカルリスニングプラグは、これまでの補聴器のイメージとはまったく違う、シャープがプロデュースした新しいリスニングツールです。人それぞれ違う“聴こえ”を、自宅以最適に調整できるリモートフィッティング。イヤホンにも切り替わる機能性。そして、身につけたくくなるようなデザイン性。聴く力を健康に保ち“健聴寿命”を延ばすことで、あなたと世界をつなぐ力になります。

## 簡単

必要なときにサッと取り出し  
お洒落に装着



充電器から取り出し、本体のメタルパーツを3秒タッチするだけですぐに補聴器としてお使いいただけます。本体のみでボリューム調整もシーン設定も簡単！

\* 初めてご利用いただく際の設定とリモートフィットサービスにはスマートフォンが必要です。

## 便利

さまざまな使用環境に合わせて  
10種類のシーンを選べます



オンライン会議




コンサート

- オンライン会議
- デスクワーク
- 打ち合わせ(少人数)
- 会議(大人数)
- 騒がしいところ
- バス・電車
- リビング
- レストラン
- 屋外スポーツ
- コンサート

お客様の聴力に合わせた標準の設定以外にさまざまな使用環境に合わせてシーン設定の切り替えができます。

## 聴こえづらさは人それぞれ。

高い音が聴こえにくい、低い音が聴こえにくいなど、人によって聴こえ方は違います。そのため補聴器はただ音を大きくするのではなく、聴こえにくい音だけを補完することで初めて聴こえやすくなります。これがメディカルリスニングプラグ(補聴器)の役目です。

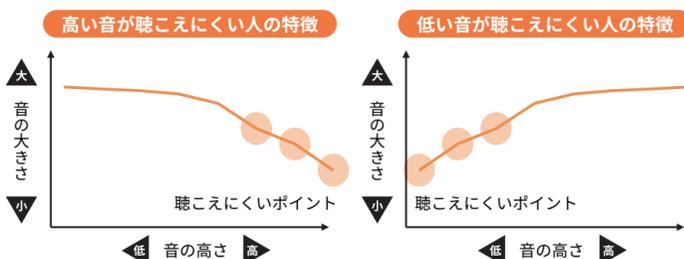

\* 図はイメージです。

## 「聴こえ」を最適化する メディカルリスニングプラグ。

使う人に合った音だけを見極め最適化するには専門の資格を持つフィッターの存在が重要です。あなたの耳の状態を正確に把握し、メディカルリスニングプラグを最適な状態に調整します。



## プロ\*のフィッター監修の 補聴器フィッティングシステム。

補聴器本体、スマホアプリ、フィッターの調整ツールすべてプロのフィッターと創り上げたフィッティングシステムで最適な調整を提供します。



\* 「認定補聴器技能者」や「言語聴覚士」の資格を持ったフィッター(調整者)や専門のフィッティングスタッフを指します。

## 人の声が聴き取りやすい設計。

入ってくる音に応じてどう出力するか(音を出すか)を細かく調整することで、周囲の音は抑えて、会話音は大きくなめらかに聴き取りやすくなります。

### 入ってくる音を3種類に分類

- 大きい音: クラクションなどの騒音
- 普通の音: 人の声や会話など
- 小さい音: 生活音や環境音など

### 出力する音(聴こえる音)を8種類に分類

- 低音から高音を8つの音階に分けどの音を大きくどの音を小さくするか細かく調整。
- 各音階の“継ぎ目”を最小化することでなめらかで聴き取りやすくなります。

また、高級イヤホンにも搭載されている、ノウルズ・エレクトロニクス製 バランスド・アーマチュアドライバーを採用。人の声である中域の音をクリアに再現します。

## 医療機器の性能を備えながらリーズナブル

リモートでのサポートに加え、調整期間延長や保証サービスをオプション(有料)とすることで、初期費用を抑えました。

価格	購入時の代金	
	一般的な補聴器	メディカルリスニングプラグ
購入価格の目安*4	両耳30万円*5 (非課税)	両耳99,800円 (希望小売価格/非課税)
医療機器認証	○ (品質・安全性・有効性)	○ (品質・安全性・有効性)
機器の調整者	認定補聴器技能者	認定補聴器技能者
機器の調整場所	購入した店舗*7	自宅などでリモート
機器の調整レベル	高い	高い

\*4 販売店や機種によって異なります。  
\*5 JapanTrak 2018調査報告(一般社団法人 日本補聴器工業会調べ)の補聴器片耳(1台)の平均購入価格15万円より両耳(2台)価格を算出。  
\*6 当社市場価格調べ。両耳(2台)価格を算出。  
\*7 機種によっては、販売店がリモートで調整できるものもあります。

## 自宅にしながらフィッティング

「聴力チェックや聴力に合わせた聴こえ具合の調整からアフターサービスまで」オンラインで対応します。



フィッティングのために何度も店舗へ行く必要がありません。

## 音楽再生や通話もできる

多彩な機能で使いやすいです。

- 01 ストリーミング** スマホの音楽や動画の音声を楽しめるストリーミングモード
- 02 ハンズフリー** 電話やオンライン会議で使えるハンズフリー通話
- 03 電池持ち** 電池内蔵の充電ケースで収納と同時に充電が可能 最大約55時間\*使えます。  
\* リスニングモードで充電ケース併用時。ストリーミングモードでは充電ケース併用時約16時間。



- <リモコン>**
  - ・音量や高音/低音の調整
  - ・シーンの切り替え
  - ・Bluetooth®設定 など
- <サービス>**
  - ・リモートフィットサービスの操作
  - ・聴こえのトレーニング
  - ・アシスタント(チャット)で相談
  - ・ビデオカウンセリング など

\*仕様およびデザインは性能・機能向上のため、変更になる場合があります。商品写真などに関しては、実物と若干異なる場合がありますので、ご了承ください。